

機械器具 39 医療用鉗子 JMDNコード10861000
一般医療機器 **クラウンポリッシングプライヤー**



【形状・構造及び原理等】

FRP材使用 プライヤー形状

【使用目的、効能又は効果】

治療時や技工作業時におけるクラウンやインレーの研磨時に
本品で補綴物を保持する。

【品目仕様等】

FRP素材が十分な硬度を有する事
カシメ部がスムーズである事
補綴物に傷を付けない事

【操作方法又は使用方法等】

本品を患者の口腔にて使用する際、患者の口唇の大きさに十分注意
を払い、適切な使用をすること。

[使用方法に関する使用上の注意]

- 1) 口角が乾燥しひび割れたような状態の場合、ワセリン等を塗布し
適切な処置を講じる事。
- 2) 長時間消毒用薬液中に放置しない事
- 3) 本品はFRP製ですので、火の近くでの使用は避けて下さい。

【使用上の注意】

- ① 損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは、
使用しないこと。
- ② 消毒等行わず、他の患者には使用しないこと。
- ③ 本材は、【性能、使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以
外には使用しないこと。
- ④ 本材は使用前に必ず消毒を行う事。高温の滅菌を行うと変形や
本材質の劣化、ひび割れ 破切を招くことが有ります
- ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

- 1 本品は、滅菌ボックス等に保管する事。
- 2 高温多湿の場所をさける事
- 3 薬液等かからない様に保存する事

【包装】

- 1 本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者氏名: デンタルフォーラム 田代 明彦
住所: 〒111-0032
東京都台東区浅草5丁目8番3号
電話番号: 03-6240-6158
FAX 番号: 03-6240-6159
外国製造元: フロンティアデンタル株式会社
大韓民国